

**E▶Eye**

**PROTOCOLLO**  
di stimolazione  
delle ghiandole  
di Meibomio



**E▶Swin**

PREMIER FABRICANT FRANÇAIS DE HAUTES TECHNOLOGIES DE LUMIÈRE

## PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO CON E•Eye

### PRIMA DELLA SEDUTA



- Spiegare la tecnologia e il principio della stimolazione delle ghiandole di Meibomio al paziente.
- Cercare un'eventuale controindicazione alla luce pulsata.
- Informare il paziente dei costi di una seduta e degli altri costi fissi.
- Fargli leggere attentamente il consenso informato ①.
- Fargli compilare e firmare il consenso informato ②.
- Chiedergli di presentarsi alla seduta senza cosmetici sulla pelle.

### AL MOMENTO DELLA SEDUTA

- Assicurarsi che il paziente non presenti alcuna controindicazione (in particolare nessun trattamento in corso).
- Assicurarsi dell'assenza di prodotti cosmetici sulla pelle. Se presenti, rimuoverli con una soluzione micellare senza profumo ③.
- Nascondere eventuali nei e altre macchie scure con i *patches*.
- Far indossare al paziente gli occhiali di protezione *eye mask* e verificare il loro corretto posizionamento ④.
- Applicare il *gel* in abbondante quantità (minimo 1 cm di spessore) facendo attenzione che non penetri nell'*eye mask* ⑤.
- Regolare la potenza col proseguire delle sedute e in base alle sensazioni del paziente e ai risultati ottenuti ⑥.
- Sbloccare i dispositivi di sicurezza ⑦.
- Indossare gli occhiali di protezione *mask* ⑧.
- Realizzare 5 flash sull'emiviso sinistro ⑨, partendo dal canto interno dell'occhio e finendo sulla zona temporale ⑩.
- Ripetere l'operazione sull'emiviso destro ⑪.
- Spegnere l'apparecchio a fine seduta.
- Rimuovere il *gel* e sciacquare la pelle ⑫.

### DOPO LA SEDUTA

- Prevenire il paziente sulla possibile insorgenza di arrossamenti.
- Raccomandare vivamente al paziente di non effettuare altri interventi sulle zone trattate per tutto il ciclo delle sedute.
- Programmare la seconda seduta due settimane più tardi (G0+15) e le altre sedute a G0+45 e (G0+75 opzionale).
- Raccomandare l'utilizzo di una protezione solare a livello delle zone trattate in caso di intensa esposizione ai raggi UV.

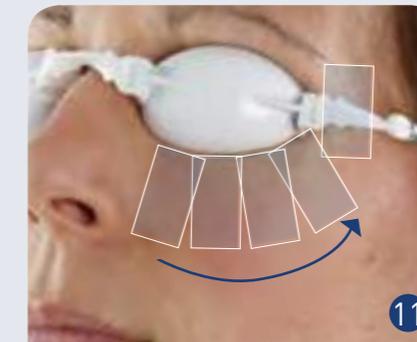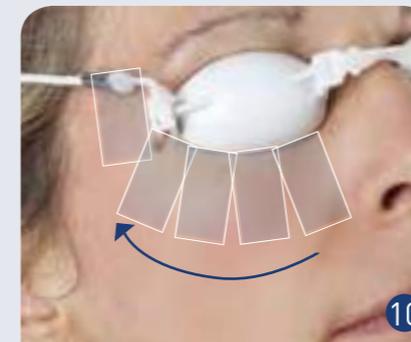

# E-EYE un'innovazione francese



Rif. : M029IT002A08A

E-EYE, progettato e prodotto da E-Swin (Francia), è un dispositivo sanitario regolamentato di classe IIb, con marcatura CE rilasciata dall'organismo CE 0499. Tratta la biefarite melbomiiana. Rispettare le condizioni d'utilizzo descritte nelle istruzioni.

