

E▶Eye

PROTOCOLO
de estimulación
de las glándulas
de Meibomio



E▶Swin

PREMIER FABRICANT FRANÇAIS DE HAUTES TECHNOLOGIES DE LUMIÈRE

EL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON EL E-Eye

ANTES DE LA SESIÓN:



- Explicar la tecnología y el principio de la estimulación de las glándulas de Meibomio al paciente.
- Buscar una eventual contraindicación a la luz pulsada.
- Informarle sobre las tarifas de una sesión y demás precios.
- Hacer que lea atentamente el consentimiento informado ①.
- Hacerle completar y firmar este consentimiento informado ②.
- Pedirle que acuda a la sesión sin cosméticos en la piel.

DURANTE LA SESIÓN:

- Asegurarse de que el paciente no tiene ninguna contraindicación (en particular un tratamiento en proceso).
- Asegurarse de la ausencia de cosméticos en la piel que de lo contrario se deben retirar con una solución micelar sin perfume ③.
- Ocultar los lunares eventuales y demás manchas oscuras con los **patches**.
- Colocar las protecciones oculares **eye mask** en su paciente y comprobar que estén bien ajustadas ④.
- Aplicar el **gel** en cantidad importante (mínimo 1 cm de espesor), teniendo cuidado que no penetre por debajo del **eye mask** ⑤.
- Regular la potencia conforme se van realizando las sesiones, según la impresión del paciente y los resultados obtenidos ⑥.
- Desbloquear las seguridades ⑦.
- Colocarse las gafas de protección **mask** ⑧.
- Realizar 5 flashes en el medio rostro izquierda ⑨, partiendo del canto interno del ojo y acabando en la zona temporal ⑩.
- Repetir la operación en el medio rostro derecho ⑪.
- Para la máquina al final de la sesión.
- Retirar el **gel** y aclarar la piel ⑫.

DESPUÉS DE LA SESIÓN:

- Avisar al paciente que pueden aparecer enrojecimientos.
- Imponer al paciente que no se realice ninguna otra intervención en las zonas tratadas con el flash, durante toda la vigencia del ciclo de sesiones.
- Prever la segunda sesión dos semanas después (D0+15), y posteriormente las otras sesiones a D0+45 (D0+75 opcional).
- Recomiende el uso de una protección solar para las zonas tratadas con el flash en caso de exposición a los UVA.

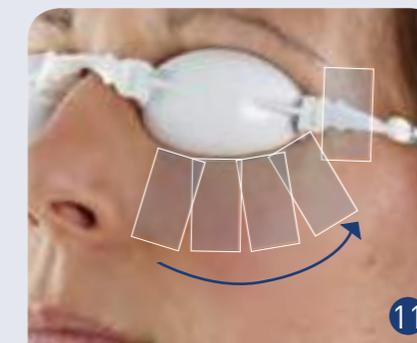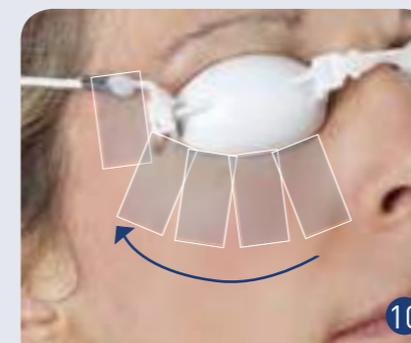

E-EYE : una innovación francesa



Ref. : M029ES001A08A

El E-EYE, diseñado y fabricado por E-Swin (Francia), es un dispositivo sanitario reglamentado de clase IIb, que lleva el marcado CE expedido por el organismo CE 0499. Trata la biefaritis melibomiana. Cumplir las condiciones de uso de la guía.

