

E▶Eye

BEHANDELING

Stimulatie van de klieren
van Meibom



E▶Swin

PREMIER FABRICANT FRANÇAIS DE HAUTES TECHNOLOGIES DE LUMIÈRE

BEHANDELING MET STIMULATIE VAN DE KLIEREN VAN MEIBOM

VÓÓR DE ZITTING:



- Leg de technologie en het principe van meibomklierstimulatie uit aan de patiënt.
- Ga na of er geen contra-indicatie is voor gepulseerd licht.
- Leg uit wat het tarief per zitting is en andere vaste kosten.
- Verzoek de patiënt om aandachtig de geïnformeerde toestemmingsverklaring door te lezen ①.
- Verzoek de patiënt om de geïnformeerde toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen ②.
- Verzoek de patiënt zonder cosmetisch product op de huid naar de afspraak te komen.

TIJDENS DE ZITTING:

- Ga na of de patiënt geen contra-indicaties heeft (vooral niet tegen momentele behandeling)
- Ga na of de patiënt geen cosmetische producten op de huid heeft en verwijder deze eventueel met een geurvrije micellaire lotion ③.
- Bedek moedervlekken en andere bruine vlekken met *patches*.
- Zet uw patiënt het veiligheids-*eye mask* op en controleer of het goed zit ④.
- Breng een ruime hoeveelheid *gel* (minstens 1cm dik) op het onderste ooglid aan (huid- zijde) en pas goed op dat het niet onder het *eye mask* ⑤ terecht komt.
- Pas in de loop van de zitting geleidelijk het vermogen aan, afhankelijk van de mate waaraan de patiënt gewend is geraakt en de behaalde resultaten ⑥.
- Ontgrendel de veiligheidsvoorzieningen ⑦.
- Zet uw veiligheidsbril op ⑧.
- Pas 5 flitsen op de linker gezichtshelft toe ⑨, vanuit de binnenste ooghoek beginnend en aan de slaapzijde eindigend.
- Herhaal dit met de rechter gezichtshelft ⑪.
- Schakel de machine aan het eind van de zitting uit.
- Verwijder de *gel* en spoel de huid schoon ⑫.

NA DE ZITTING:

- Waarschuw de patiënt dat er roodheid kan optreden.
- Leg aan de patiënt uit dat andere behandelingen op de behandelde gebieden niet zijn toegestaan gedurende de volledige cyclus van de zittingen.
- Plan de tweede zitting voor twee weken later (D0 + 15) en de daaropvolgende zittingen op D0 + 45 en D0 (+ 75 fakultativ) (D = dag).
- Leg aan de patiënt uit dat hij of zij zonnebrandcrème dient te gebruiken op de behandelde gebieden als deze aan UV worden blootgesteld.

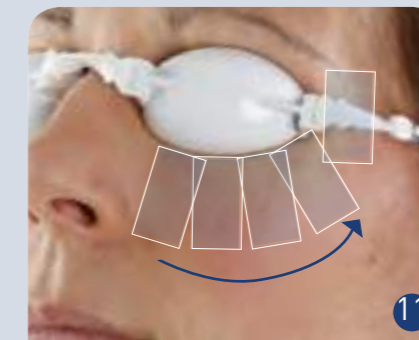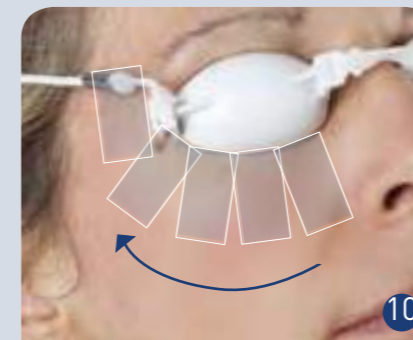

E-EYE: een Franse innovatie



Ref. : M029NL001A08A

De E-EYE, ontworpen en geproduceerd door E-Swin (Frankrijk), is een klasse IIb gecertificeerd, medisch apparaat met een CE-markering (door het CE 0499 lichaam). Het behandelt Meibom-bleefaritis. Volg de instructies in de gebruikershandleiding op.

