

Schau auf deine Augen.

Augenservice-Protokoll

tear
stim

Augenservice-Protokoll

Macht Augen fit & beugt Problemen vor

Vor der Anwendung:

- Erklären Sie dem Kunden die Technologie.
- Eruiieren Sie, ob der Kunde für die Anwendung mit Pulslicht grundsätzlich geeignet ist. Die Kriterien dazu finden Sie im Handbuch auf Seite 10.
- Bitten Sie den Kunden, sich den Augenschein aufmerksam durchzulesen **1**.
- Lassen Sie den Kunden den Augenschein ausfüllen und unterschreiben **2**.
- Weisen Sie den Kunden darauf hin, im Anwendungsbereich kein Make-up aufzutragen.





Während der Anwendung:

- Vergewissern Sie sich, dass der Kunde die Voraussetzungen der Anwendung mit Pulslicht erfüllt (insbesondere, dass keine photosensibilisierende Anwendung zeitgleich durchgeführt wird).
- Vergewissern Sie sich, dass die Haut frei von Kosmetika / Make-up ist; andernfalls muss dieses mit unparfümiertem, mizellarem Reinigungswasser entfernt werden **3**.
- Decken Sie eventuell vorhandene Muttermale oder Hautveränderungen mit Hilfe der patches ab.
- Legen Sie dem Kunden die Schutzbrille eye mask an und kontrollieren Sie deren korrekten Sitz **4**.
- Tragen Sie das Gel in reichlicher Menge (mindestens 1 cm dick) auf das untere Augenlid auf; achten Sie darauf, dass kein Gel unter die eye mask gelangt **5**.
- Bestätigen Sie die Freigabe der Sicherheits-Buttons **6**.
- Stellen Sie die Intensität der Lichtimpulse abgestimmt auf die beiliegende Hauttyp-Skala ein **7**.
- Legen Sie Ihre Schutzbrille mask an **8**.

- Setzen Sie 10 Flashes (Lichtimpulse) unter einem Auge **9**, beginnend vom inneren Augenwinkel hin zum Schläfenbereich **10**.
- Wiederholen Sie die Anwendung auf der zweiten Gesichtshälfte **11**.
- Entfernen Sie das gel vom Anwendungsbereich **12**.

Nach der Anwendung:

- Informieren Sie den Kunden darüber, dass Hautrötungen auftreten können.
- Weisen Sie den Kunden an, während des gesamten Eye Service-Protokolls keine photosensibilisierenden Anwendungen auf diesen Hautarealen vorzunehmen.
- Planen Sie die zweite Anwendung zwei Wochen später (Tag 0 + 15) und die dritte Anwendung vier Wochen später (Tag 0 + 45) ein. Falls erforderlich, eine vierte Anwendung weitere vier Wochen später anbieten (Tag 0 + 75).
- Empfehlen Sie dem Kunden im Anwendungsbereich bei UV-Einstrahlung Sonnenschutz aufzutragen.

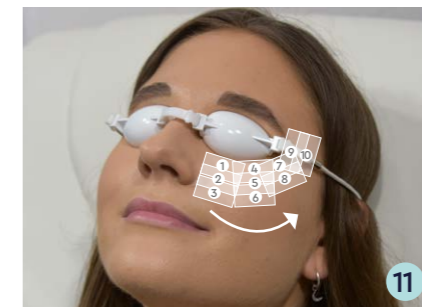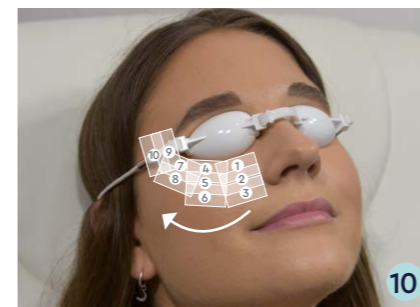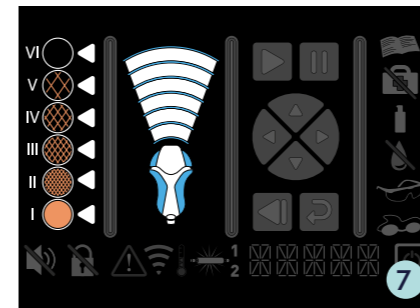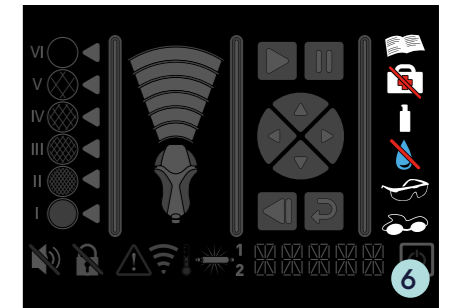

tear stim

Für mehr Informationen
www.schauaufdeineaugen.com

FRENCH INNOVATION DESIGNED BY

ESW
Vision